

	INSTRUCTION DE TRAVAIL : PROTOCOLE DE RECUEIL AVEC COLLECTEUR D'URINES	IT-MU-072-02 Page 1 sur 1
--	---	------------------------------

L'examen cyto bactériologique des urines permet de rechercher une infection et d'identifier le (s) micro-organisme (s) en cause.

Collecteur d'urines pour enfants (type urinocol) → recueil géré par les parents :

- Se laver les mains.
- Faire une toilette soignée du méat urétral et des organes génitaux externes de l'enfant. Pour les garçons, décalotter si possible avant désinfection.
- Choisir le sac collecteur adapté.
- Mettre l'enfant sur le dos, les jambes écartées.
- Nettoyer soigneusement la peau avec une lingette antiseptique. La peau doit être propre et sèche.
- Détacher et jeter la découpe centrale du collecteur.
- Retirer le revêtement qui protège l'adhésif.
- Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence.
- Ne pas dépasser une heure de pose du sac collecteur.
- Pour enlever la poche soulever un coin et détacher doucement.
- Pour assurer l'étanchéité, coller l'adhésif face contre face, renforcer éventuellement avec un sparadrap
- éviter le transfert de l'urine dans un autre flacon.

Une fois effectué, apportez le prélèvement à votre laboratoire le plus rapidement possible.